



医疗器械召回事件报告表

(公司内部召回编号: FMI 37206)

提交: 企业所在地省级食品药品监督管理部门

器械注册/备案部门


产品名称	病人监护仪	注册证或备案凭证编码	国械注准 20213070178
生产企业名称	通用电气医疗系统(中国)有限公司		
代理人名称	/		
召回单位负责人和联系方式, 经办人和联系方式	负责人: 李延 010-57388736 经办人: 彭一苇 010-57388736		
产品的适用范围	用于医院环境和医院内部转运过程中, 用于对于成人、小儿和新生儿的心电(含 ST 段和心律失常分析)、阻抗呼吸、脉率、脉搏血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、心输出量、气道气体(呼吸率和呼气末二氧化碳、氧气、笑气和麻醉气体)、熵指数、神经肌电传导监护。其中, 心输出量测量不适用于新生儿患者; 单宽度气道模块用于实时测量呼气末二氧化碳气体浓度以及呼吸率, 适用于体重在 5 千克以上的患者, 不适用于新生儿患者; 熵指数监护适用于 2 岁以上患者; 神经肌电传导检测适用于体重 5 千克以上的儿科患者, 不适用于神经肌肉结合功能异常的患者。		
涉及地区和国家	中国、美国、欧盟 等国家和地区	召回级别	二级
涉及产品生产(或进口中国)批次、数量	1115 台	涉及产品型号、规格	B105P、B125P、B105M、B125M、B155M
识别信息(如批号)	见附表 1 识别信息	涉及产品在中国的销售数量	1115 台
召回原因简述	GE 医疗近期发现, 如果某些 B1x5P/B1x5M 病人监护仪使用“mmHg”或“kPa”作为 CO ₂ 测量单位, 则在非海平面或非接近海平面的位置使用时, CO ₂ 测量的显示值可能不准确。这个问题可能导致对通气或呼吸状态的误解, 从而导致患者治疗延迟或不准确。如果使用“%”作为 CO ₂ 测量单位, 则没有影响。目前没有收到因此问题导致伤害的报告。 GE 医疗中国未收到与该问题相关的国内市场反馈、国内投诉和不良事件相关信息。维护高标准的安全和质量是我们的首要任务, GE 医疗决定主动召回受影响产品。		
纠正行动简述(包括召回要求和处理方式等)	1. GE 医疗将通知客户此问题、注意事项以及应采取的措施; 2. GE 医疗将派工程师对受影响的产品进行免费检查和修正; 注: 本次纠正行动不涉及受影响产品的停用及退回。		

报告单位: (盖章)

报告人: 彭一苇

负责人: 李延

报告日期: 2022 年 11 月 30 日

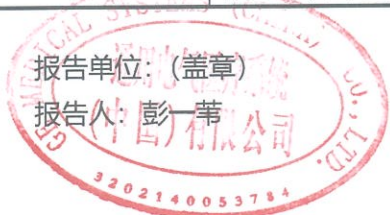

附表 1 识别信息

#	识别信息(序列号)	#	识别信息(序列号)	#	识别信息(序列号)	#	识别信息(序列号)	#	识别信息(序列号)	#	识别信息(序列号)
1	SR821230011WA	201	SR822122015WA	401	SR822352251WA	601	SR722060031WA	801	SR621452037WA	1001	SR622192041WA
2	SR821240017WA	202	SR822122016WA	402	SR822372023WA	602	SR722060029WA	802	SR621452034WA	1002	SR622212001WA
3	SR821240019WA	203	SR822122017WA	403	SR822372022WA	603	SR722060027WA	803	SR621452035WA	1003	SR622162022WA
4	SR821240018WA	204	SR822122019WA	404	SR822372010WA	604	SR722060028WA	804	SR621452036WA	1004	SR622212002WA
5	SR821240023WA	205	SR822122020WA	405	SR822372048WA	605	SR722060033WA	805	SR621452038WA	1005	SR622212003WA
6	SR821250010WA	206	SR822122004WA	406	SR822362004WA	606	SR722060025WA	806	SR621452039WA	1006	SR622212004WA
7	SR821250009WA	207	SR822122001WA	407	SR822362002WA	607	SR722060026WA	807	SR621452040WA	1007	SR622212005WA
8	SR821250008WA	208	SR822122002WA	408	SR822362003WA	608	SR722060032WA	808	SR621452041WA	1008	SR622212006WA
9	SR821250014WA	209	SR822122003WA	409	SR822362050WA	609	SR722090041WA	809	SR621452042WA	1009	SR622212007WA
10	SR821250011WA	210	SR822122023WA	410	SR822362047WA	610	SR722090039WA	810	SR621452043WA	1010	SR622232012WA
11	SR821250012WA	211	SR822122021WA	411	SR822362048WA	611	SR722090040WA	811	SR621452044WA	1011	SR622232011WA
12	SR821250013WA	212	SR822122022WA	412	SR822362049WA	612	SR721490129WA	812	SR621452045WA	1012	SR622232004WA
13	SR821250015WA	213	SR822082061WA	413	SR822362051WA	613	SR722110015WA	813	SR621452046WA	1013	SR622232001WA
14	SR821250016WA	214	SR822082059WA	414	SR822372040WA	614	SR722090036WA	814	SR621452047WA	1014	SR622232002WA
15	SR821250017WA	215	SR822082060WA	415	SR822372041WA	615	SR722090037WA	815	SR621452048WA	1015	SR622232003WA
16	SR821250018WA	216	SR822132004WA	416	SR822372042WA	616	SR722110014WA	816	SR621452049WA	1016	SR622232005WA
17	SR821250019WA	217	SR822132001WA	417	SR822372043WA	617	SR722110016WA	817	SR621452050WA	1017	SR622232006WA
18	SR821250020WA	218	SR822132002WA	418	SR822372011WA	618	SR722110017WA	818	SR621452051WA	1018	SR622232007WA
19	SR821270053WA	219	SR822132003WA	419	SR822372047WA	619	SR722110018WA	819	SR621452052WA	1019	SR622232008WA
20	SR821270052WA	220	SR822132005WA	420	SR822372044WA	620	SR722110019WA	820	SR621452053WA	1020	SR622232009WA
21	SR821320043WA	221	SR822132006WA	421	SR822372045WA	621	SR722110020WA	821	SR621452054WA	1021	SR622232010WA
22	SR821320012WA	222	SR822132007WA	422	SR822372046WA	622	SR722110021WA	822	SR621452055WA	1022	SR622242001WA
23	SR821330003WA	223	SR822132008WA	423	SR822372071WA	623	SR722090038WA	823	SR621452056WA	1023	SR622352029WA
24	SR821330001WA	224	SR822132009WA	424	SR822372068WA	624	SR722120007WA	824	SR621452057WA	1024	SR622352030WA
25	SR821330002WA	225	SR822132010WA	425	SR822372069WA	625	SR722120004WA	825	SR621452058WA	1025	SR622352031WA
26	SR821330068WA	226	SR822192008WA	426	SR822372070WA	626	SR722120005WA	826	SR621452059WA	1026	SR622362302WA
27	SR821330066WA	227	SR822192005WA	427	SR822372072WA	627	SR722120006WA	827	SR621452060WA	1027	SR622382030WA
28	SR821330067WA	228	SR822192006WA	428	SR822372067WA	628	SR722120008WA	828	SR621440004WA	1028	SR622372028WA
29	SR821360321WA	229	SR822192007WA	429	SR822372078WA	629	SR722120009WA	829	SR621440001WA	1029	SR622382001WA
30	SR821360323WA	230	SR822192018WA	430	SR822372077WA	630	SR722120010WA	830	SR621440002WA	1030	SR622382007WA
31	SR821360322WA	231	SR822192015WA	431	SR822382087WA	631	SR722120003WA	831	SR621440003WA	1031	SR622382004WA
32	SR821370004WA	232	SR822192016WA	432	SR822382084WA	632	SR722120002WA	832	SR621440005WA	1032	SR622382005WA
33	SR821370001WA	233	SR822192017WA	433	SR822382085WA	633	SR722120001WA	833	SR621440006WA	1033	SR622382006WA

34	SR821370002WA	234	SR822192002WA	434	SR822382086WA	634	SR722120025WA	834	SR621440007WA	1034	SR622382008WA
35	SR821370003WA	235	SR822192001WA	435	SR822382088WA	635	SR722120024WA	835	SR621440008WA	1035	SR622382009WA
36	SR821380008WA	236	SR822192004WA	436	SR822382089WA	636	SR722120014WA	836	SR621440009WA	1036	SR622382010WA
37	SR821380009WA	237	SR822192003WA	437	SR822372076WA	637	SR722120011WA	837	SR621440013WA	1037	SR622382011WA
38	SR821380007WA	238	SR822192014WA	438	SR822372075WA	638	SR722120012WA	838	SR621440010WA	1038	SR622382012WA
39	SR821380012WA	239	SR822192009WA	439	SR822382009WA	639	SR722120013WA	839	SR621440011WA	1039	SR622382013WA
40	SR821380011WA	240	SR822192013WA	440	SR822382007WA	640	SR722120015WA	840	SR621440012WA	1040	SR622382014WA
41	SR821380010WA	241	SR822192010WA	441	SR822382008WA	641	SR722120016WA	841	SR621440014WA	1041	SR622382015WA
42	SR821410129WA	242	SR822192011WA	442	SR822382006WA	642	SR722120017WA	842	SR621440015WA	1042	SR622382016WA
43	SR821430015WA	243	SR822192012WA	443	SR822382005WA	643	SR722120018WA	843	SR621440016WA	1043	SR622382017WA
44	SR821430014WA	244	SR822202036WA	444	SR822382004WA	644	SR722120019WA	844	SR621440017WA	1044	SR622122002WA
45	SR821452074WA	245	SR822202024WA	445	SR821380026WA	645	SR722120020WA	845	SR621440018WA	1045	SR622122001WA
46	SR821452071WA	246	SR822202025WA	446	SR821380023WA	646	SR722120021WA	846	SR621452001WA	1046	SR622382031WA
47	SR821452072WA	247	SR822202026WA	447	SR821380024WA	647	SR722120022WA	847	SR621452002WA	1047	SR622382029WA
48	SR821452073WA	248	SR822202027WA	448	SR821380025WA	648	SR722120023WA	848	SR621452003WA	1048	SR621420004WA
49	SR821452075WA	249	SR822202028WA	449	SR821380027WA	649	SR722130002WA	849	SR621452004WA	1049	SR622022066WA
50	SR821452076WA	250	SR822202029WA	450	SR821380028WA	650	SR722130001WA	850	SR621452008WA	1050	SR622022063WA
51	SR821452077WA	251	SR822202030WA	451	SR821380029WA	651	SR722150070WA	851	SR621452005WA	1051	SR622022064WA
52	SR821452078WA	252	SR822202031WA	452	SR821380030WA	652	SR722150068WA	852	SR621452006WA	1052	SR622022065WA
53	SR821452079WA	253	SR822202032WA	453	SR821380031WA	653	SR722150069WA	853	SR621452007WA	1053	SR622112057WA
54	SR821452080WA	254	SR822202033WA	454	SR821380032WA	654	SR722150071WA	854	SR621452009WA	1054	SR622232013WA
55	SR821452070WA	255	SR822202034WA	455	SR821380033WA	655	SR722150073WA	855	SR621452010WA	1055	SR521220026WA
56	SR821452067WA	256	SR822202038WA	456	SR821380034WA	656	SR722190080WA	856	SR621452011WA	1056	SR421230004WA
57	SR821452068WA	257	SR822202035WA	457	SR821380035WA	657	SR722190079WA	857	SR621452012WA	1057	SR421230001WA
58	SR821452069WA	258	SR822202037WA	458	SR821380036WA	658	SR722190027WA	858	SR621452013WA	1058	SR421230002WA
59	SR821430046WA	259	SR822192058WA	459	SR821380037WA	659	SR722190076WA	859	SR621452014WA	1059	SR421230003WA
60	SR821462074WA	260	SR822192055WA	460	SR821380038WA	660	SR722190077WA	860	SR621452015WA	1060	SR421230005WA
61	SR821462073WA	261	SR822192056WA	461	SR821380039WA	661	SR722190078WA	861	SR621452016WA	1061	SR421230006WA
62	SR821462092WA	262	SR822192057WA	462	SR821380040WA	662	SR722190075WA	862	SR621452017WA	1062	SR421230007WA
63	SR821462089WA	263	SR822192059WA	463	SR821380041WA	663	SR722200001WA	863	SR621452025WA	1063	SR421230008WA
64	SR821462090WA	264	SR822192060WA	464	SR821380042WA	664	SR722160112WA	864	SR621452018WA	1064	SR421230009WA
65	SR821462091WA	265	SR822192061WA	465	SR821380043WA	665	SR722150072WA	865	SR621452019WA	1065	SR421230010WA
66	SR821462088WA	266	SR822192062WA	466	SR821380044WA	666	SR722160110WA	866	SR621452020WA	1066	SR421230011WA
67	SR821462086WA	267	SR822192063WA	467	SR821380045WA	667	SR722160113WA	867	SR621452021WA	1067	SR421230012WA
68	SR821462087WA	268	SR822192064WA	468	SR821380046WA	668	SR722160109WA	868	SR621452022WA	1068	SR421230013WA
69	SR821472062WA	269	SR822192065WA	469	SR821380047WA	669	SR722160115WA	869	SR621452023WA	1069	SR421230014WA

70	SR821472009WA	270	SR822192066WA	470	SR821430020WA	670	SR722160114WA	870	SR621452024WA	1070	SR421230015WA
71	SR821482001WA	271	SR822192050WA	471	SR821430045WA	671	SR722200002WA	871	SR621452026WA	1071	SR421230016WA
72	SR821472024WA	272	SR822192047WA	472	SR821430016WA	672	SR722160108WA	872	SR621452027WA	1072	SR421230017WA
73	SR821482067WA	273	SR822192048WA	473	SR821430017WA	673	SR722160111WA	873	SR621452028WA	1073	SR421230018WA
74	SR821482065WA	274	SR822192049WA	474	SR821430018WA	674	SR722220020WA	874	SR621452029WA	1074	SR421230019WA
75	SR821482066WA	275	SR822192051WA	475	SR821430019WA	675	SR722220019WA	875	SR621452030WA	1075	SR421230020WA
76	SR821492031WA	276	SR822192052WA	476	SR821430021WA	676	SR722220009WA	876	SR621452031WA	1076	SR421250058WA
77	SR821492029WA	277	SR822192053WA	477	SR821430022WA	677	SR722220006WA	877	SR621452032WA	1077	SR421250057WA
78	SR821492030WA	278	SR822192054WA	478	SR821430023WA	678	SR722220007WA	878	SR621452033WA	1078	SR421250051WA
79	SR821492028WA	279	SR822202023WA	479	SR821430024WA	679	SR722220008WA	879	SR621502017WA	1079	SR822392015WA
80	SR821492026WA	280	SR822202022WA	480	SR821430025WA	680	SR722220010WA	880	SR621502015WA	1080	SR822392014WA
81	SR821492027WA	281	SR822202021WA	481	SR821430026WA	681	SR722220011WA	881	SR621502016WA	1081	SR822392012WA
82	SR821502034WA	282	SR822202019WA	482	SR821430030WA	682	SR722220012WA	882	SR621512071WA	1082	SR822392011WA
83	SR821512005WA	283	SR822202020WA	483	SR821430027WA	683	SR722220013WA	883	SR621512068WA	1083	SR822392013WA
84	SR821512012WA	284	SR822212007WA	484	SR821430028WA	684	SR722220015WA	884	SR621512069WA	1084	SR722380070WA
85	SR821512023WA	285	SR822212006WA	485	SR821430029WA	685	SR722220014WA	885	SR621512070WA	1085	SR722380069WA
86	SR821512018WA	286	SR822212004WA	486	SR821430036WA	686	SR722230060WA	886	SR621512075WA	1086	SR722390236WA
87	SR821512019WA	287	SR822212005WA	487	SR821430037WA	687	SR722230061WA	887	SR621512072WA	1087	SR722390233WA
88	SR821512020WA	288	SR822212003WA	488	SR821430038WA	688	SR722230064WA	888	SR621512073WA	1088	SR722390234WA
89	SR821512021WA	289	SR822212001WA	489	SR821430039WA	689	SR722230063WA	889	SR621512074WA	1089	SR722390235WA
90	SR821512022WA	290	SR822212002WA	490	SR821430040WA	690	SR722230065WA	890	SR621512076WA	1090	SR722390237WA
91	SR821512024WA	291	SR822212015WA	491	SR821430041WA	691	SR722250001WA	891	SR621512077WA	1091	SR722390238WA
92	SR821512025WA	292	SR822212014WA	492	SR821430042WA	692	SR722240001WA	892	SR621512078WA	1092	SR722390239WA
93	SR821512026WA	293	SR822220200WA	493	SR821430044WA	693	SR722240002WA	893	SR621512079WA	1093	SR722390240WA
94	SR821512027WA	294	SR82222017WA	494	SR821430043WA	694	SR722240003WA	894	SR621512080WA	1094	SR722390241WA
95	SR821512028WA	295	SR82222018WA	495	SR822122027WA	695	SR722230062WA	895	SR621512081WA	1095	SR722390242WA
96	SR821512029WA	296	SR82222019WA	496	SR822122024WA	696	SR722250003WA	896	SR621512082WA	1096	SR622392077WA
97	SR821512030WA	297	SR82222021WA	497	SR822122025WA	697	SR722250002WA	897	SR621512083WA	1097	SR622392074WA
98	SR821512031WA	298	SR82222022WA	498	SR822122026WA	698	SR722250004WA	898	SR621512084WA	1098	SR622392075WA
99	SR821512032WA	299	SR82222023WA	499	SR822122028WA	699	SR722250013WA	899	SR621512085WA	1099	SR622392076WA
100	SR821512033WA	300	SR82222024WA	500	SR822122029WA	700	SR722250014WA	900	SR621512086WA	1100	SR622392078WA
101	SR821512009WA	301	SR82222025WA	501	SR822122030WA	701	SR722340002WA	901	SR621512087WA	1101	SR622392079WA
102	SR821512006WA	302	SR82222026WA	502	SR822172015WA	702	SR722340001WA	902	SR621512088WA	1102	SR622392080WA
103	SR821512007WA	303	SR82222027WA	503	SR822162057WA	703	SR722340014WA	903	SR621512089WA	1103	SR622392081WA
104	SR821512008WA	304	SR82222028WA	504	SR822162054WA	704	SR722340015WA	904	SR621512090WA	1104	SR622392082WA
105	SR821512010WA	305	SR82222029WA	505	SR822162055WA	705	SR722350056WA	905	SR621512091WA	1105	SR622392083WA

106	SR821512011WA	306	SR82222030WA	506	SR822162056WA	706	SR722350052WA	906	SR621512092WA	1106	SR622392084WA
107	SR821512036WA	307	SR82222031WA	507	SR82222057WA	707	SR722350057WA	907	SR621512093WA	1107	SR622392085WA
108	SR821512034WA	308	SR82222032WA	508	SR82222054WA	708	SR722350053WA	908	SR621512094WA	1108	SR622392086WA
109	SR821512035WA	309	SR82222004WA	509	SR82222055WA	709	SR722350054WA	909	SR621512095WA	1109	SR622392087WA
110	SR821512040WA	310	SR82222001WA	510	SR82222056WA	710	SR722350055WA	910	SR621512096WA	1110	SR622392088WA
111	SR821512037WA	311	SR82222002WA	511	SR82222058WA	711	SR722350058WA	911	SR621512097WA	1111	SR622392089WA
112	SR821512038WA	312	SR82222003WA	512	SR82222059WA	712	SR722350059WA	912	SR621512098WA	1112	SR622392090WA
113	SR821512039WA	313	SR82222005WA	513	SR82222060WA	713	SR722350060WA	913	SR621512099WA	1113	SR622392091WA
114	SR821512041WA	314	SR82222006WA	514	SR82222061WA	714	SR722350061WA	914	SR621512100WA	1114	SR622392092WA
115	SR821512042WA	315	SR82222007WA	515	SR82222062WA	715	SR722350062WA	915	SR621512101WA	1115	SR622392093WA
116	SR821512043WA	316	SR82222008WA	516	SR82222063WA	716	SR722350063WA	916	SR621512102WA		
117	SR821512046WA	317	SR82222009WA	517	SR82222064WA	717	SR722370142WA	917	SR621512103WA		
118	SR821512044WA	318	SR82222013WA	518	SR82222065WA	718	SR722360064WA	918	SR621502034WA		
119	SR821512045WA	319	SR82222010WA	519	SR82222066WA	719	SR722360063WA	919	SR621502035WA		
120	SR822012008WA	320	SR82222011WA	520	SR82222067WA	720	SR722360065WA	920	SR621502036WA		
121	SR822012005WA	321	SR82222012WA	521	SR82222068WA	721	SR722360066WA	921	SR621502037WA		
122	SR822012006WA	322	SR82222014WA	522	SR82222069WA	722	SR722360264WA	922	SR621502038WA		
123	SR822012007WA	323	SR82222015WA	523	SR82222070WA	723	SR722360262WA	923	SR621502039WA		
124	SR822012009WA	324	SR82222016WA	524	SR822382003WA	724	SR722360263WA	924	SR621502043WA		
125	SR822012010WA	325	SR82222033WA	525	SR822122032WA	725	SR722370146WA	925	SR621502040WA		
126	SR822012011WA	326	SR82222074WA	526	SR822122031WA	726	SR722370143WA	926	SR621502041WA		
127	SR822012012WA	327	SR82222071WA	527	SR822242065WA	727	SR722370144WA	927	SR621502042WA		
128	SR822012013WA	328	SR82222072WA	528	SR822242064WA	728	SR722370145WA	928	SR621502044WA		
129	SR822012014WA	329	SR82222073WA	529	SR721380009WA	729	SR722370147WA	929	SR621502045WA		
130	SR822012015WA	330	SR82222075WA	530	SR722120026WA	730	SR722370148WA	930	SR621502046WA		
131	SR822012004WA	331	SR82222097WA	531	SR721250004WA	731	SR722370149WA	931	SR621502047WA		
132	SR822012002WA	332	SR82222034WA	532	SR721250013WA	732	SR722370150WA	932	SR621502048WA		
133	SR822012003WA	333	SR82222035WA	533	SR721250012WA	733	SR722370151WA	933	SR621502049WA		
134	SR822012001WA	334	SR82222036WA	534	SR721350094WA	734	SR722370152WA	934	SR621502050WA		
135	SR822032010WA	335	SR82222038WA	535	SR721350091WA	735	SR722370216WA	935	SR621502051WA		
136	SR822032013WA	336	SR82222039WA	536	SR721350092WA	736	SR722370214WA	936	SR621502052WA		
137	SR822032011WA	337	SR82222041WA	537	SR721350093WA	737	SR722370215WA	937	SR621502053WA		
138	SR822032012WA	338	SR82222040WA	538	SR721350095WA	738	SR722380075WA	938	SR621502054WA		
139	SR822032017WA	339	SR82222078WA	539	SR721350096WA	739	SR722380072WA	939	SR621512001WA		
140	SR822032014WA	340	SR82222076WA	540	SR721350097WA	740	SR722380073WA	940	SR621512002WA		
141	SR822032015WA	341	SR82222077WA	541	SR721350098WA	741	SR722380074WA	941	SR621512003WA		

142	SR822032016WA	342	SR822232033WA	542	SR721350099WA	742	SR722380076WA	942	SR621512004WA
143	SR822032019WA	343	SR822232032WA	543	SR721350100WA	743	SR722380077WA	943	SR621512005WA
144	SR822032018WA	344	SR822222043WA	544	SR721380003WA	744	SR722380078WA	944	SR621512006WA
145	SR822062033WA	345	SR822222042WA	545	SR721380002WA	745	SR722380079WA	945	SR621512007WA
146	SR822062020WA	346	SR822232034WA	546	SR721380006WA	746	SR722380080WA	946	SR621512008WA
147	SR822062019WA	347	SR822222079WA	547	SR721380005WA	747	SR722380081WA	947	SR621512009WA
148	SR822062022WA	348	SR822232036WA	548	SR721380001WA	748	SR621270072WA	948	SR621512010WA
149	SR822062021WA	349	SR822232035WA	549	SR721420003WA	749	SR621270069WA	949	SR621512011WA
150	SR822062023WA	350	SR822232039WA	550	SR721420002WA	750	SR621270070WA	950	SR621502023WA
151	SR822062024WA	351	SR822232037WA	551	SR721440001WA	751	SR621270071WA	951	SR621502020WA
152	SR822062025WA	352	SR822232038WA	552	SR721450014WA	752	SR621270073WA	952	SR621502021WA
153	SR822062026WA	353	SR822232053WA	553	SR721450011WA	753	SR621270074WA	953	SR621502022WA
154	SR822062027WA	354	SR822232050WA	554	SR721450012WA	754	SR621270058WA	954	SR621502024WA
155	SR822062028WA	355	SR822232051WA	555	SR721450013WA	755	SR621270055WA	955	SR621502025WA
156	SR822062029WA	356	SR822232052WA	556	SR721450018WA	756	SR621270056WA	956	SR621502026WA
157	SR822062030WA	357	SR822232054WA	557	SR721450015WA	757	SR621270057WA	957	SR621502027WA
158	SR822062031WA	358	SR822232055WA	558	SR721450016WA	758	SR621270059WA	958	SR621502028WA
159	SR822062032WA	359	SR822232056WA	559	SR721450017WA	759	SR621270060WA	959	SR621502029WA
160	SR822062034WA	360	SR822232057WA	560	SR721450019WA	760	SR621270061WA	960	SR621502030WA
161	SR822072001WA	361	SR822232058WA	561	SR721450020WA	761	SR621270062WA	961	SR621502031WA
162	SR822072002WA	362	SR822232059WA	562	SR721460041WA	762	SR621270063WA	962	SR621502032WA
163	SR822082052WA	363	SR822232060WA	563	SR721420001WA	763	SR621270064WA	963	SR621502033WA
164	SR822082050WA	364	SR822232061WA	564	SR721510017WA	764	SR621270065WA	964	SR621502018WA
165	SR822082049WA	365	SR822232062WA	565	SR721510014WA	765	SR621270066WA	965	SR621502019WA
166	SR822082040WA	366	SR822232042WA	566	SR721510015WA	766	SR621270068WA	966	SR621512012WA
167	SR822082045WA	367	SR822232040WA	567	SR721510016WA	767	SR621270067WA	967	SR621512013WA
168	SR822082057WA	368	SR822232041WA	568	SR721510018WA	768	SR621330017WA	968	SR621512014WA
169	SR822082042WA	369	SR822232046WA	569	SR721510019WA	769	SR621330014WA	969	SR621512055WA
170	SR822082041WA	370	SR822232043WA	570	SR721510020WA	770	SR621330015WA	970	SR621512056WA
171	SR822082048WA	371	SR822232044WA	571	SR721510021WA	771	SR621330016WA	971	SR621512057WA
172	SR822082043WA	372	SR822232045WA	572	SR721510022WA	772	SR621330018WA	972	SR621512058WA
173	SR822082044WA	373	SR822232047WA	573	SR721510013WA	773	SR621330019WA	973	SR621512059WA
174	SR822082047WA	374	SR822232049WA	574	SR721510024WA	774	SR621370004WA	974	SR621512060WA
175	SR822082051WA	375	SR822232048WA	575	SR721510023WA	775	SR621370005WA	975	SR621512061WA
176	SR822082053WA	376	SR822212013WA	576	SR721510006WA	776	SR621380127WA	976	SR621512062WA
177	SR822082056WA	377	SR822212008WA	577	SR721510003WA	777	SR621380128WA	977	SR621512063WA

178	SR822082054WA	378	SR822212009WA	578	SR721510004WA	778	SR621380008WA	978	SR621512064WA
179	SR822082055WA	379	SR822212010WA	579	SR721510005WA	779	SR621380005WA	979	SR621512065WA
180	SR822112023WA	380	SR822212011WA	580	SR721510007WA	780	SR621380006WA	980	SR621512066WA
181	SR822112022WA	381	SR822212012WA	581	SR721510008WA	781	SR621380007WA	981	SR621512067WA
182	SR822112027WA	382	SR822232031WA	582	SR721510009WA	782	SR621380009WA	982	SR622062030WA
183	SR822112024WA	383	SR822242001WA	583	SR721510010WA	783	SR621380010WA	983	SR622062029WA
184	SR822112025WA	384	SR822202018WA	584	SR721510011WA	784	SR621380011WA	984	SR622062036WA
185	SR822112026WA	385	SR822222051WA	585	SR721510012WA	785	SR621380012WA	985	SR622062031WA
186	SR822112028WA	386	SR822222048WA	586	SR721510026WA	786	SR621380013WA	986	SR622092037WA
187	SR822082058WA	387	SR822222049WA	587	SR721510025WA	787	SR621380014WA	987	SR622092036WA
188	SR822082039WA	388	SR822222050WA	588	SR721510029WA	788	SR621452064WA	988	SR622132004WA
189	SR822082046WA	389	SR822222047WA	589	SR721510027WA	789	SR621452061WA	989	SR622132001WA
190	SR822122008WA	390	SR822222044WA	590	SR721510028WA	790	SR621452062WA	990	SR622132002WA
191	SR822122005WA	391	SR822222045WA	591	SR722010003WA	791	SR621452063WA	991	SR622132003WA
192	SR822122006WA	392	SR822222046WA	592	SR722010004WA	792	SR621452065WA	992	SR622132005WA
193	SR822122007WA	393	SR822222053WA	593	SR722010001WA	793	SR621452066WA	993	SR622132006WA
194	SR822122009WA	394	SR822222052WA	594	SR722010002WA	794	SR621452067WA	994	SR622132007WA
195	SR822122010WA	395	SR822252001WA	595	SR722060024WA	795	SR621452068WA	995	SR622132008WA
196	SR822122011WA	396	SR822252003WA	596	SR722060023WA	796	SR621452069WA	996	SR622132009WA
197	SR822122012WA	397	SR822252002WA	597	SR722060021WA	797	SR621452070WA	997	SR622132010WA
198	SR822122013WA	398	SR822272001WA	598	SR722060022WA	798	SR621452071WA	998	SR622062035WA
199	SR822122014WA	399	SR822342001WA	599	SR722060034WA	799	SR621452072WA	999	SR622062034WA
200	SR822122018WA	400	SR822342003WA	600	SR722060030WA	800	SR621452073WA	1000	SR622192042WA